



MetaTalk

spricht jetzt viele Sprachen

MetaTalk spricht jetzt viele Sprachen. Deshalb heißt die neue App nur noch MetaTalk, ohne den Zusatz DE. Neu ist auch das weiße App-Icon. Wer bisher bereits die App MetaTalkDE mit blauem App-Icon nutzte, kann alle neuen Funktionen per kostenlosem Update laden.

Vier deutschsprachige Vokabulare, gebrauchsfertig und anpassbar:

- MetaTalkDE.6x11 mit ca. 5000 Wörtern/Aussagen
 - MetaTalkDE.5x9 mit ca. 2000 Wörtern/Aussagen
 - MetaTalkDE.4x7 mit ca. 1500 Wörtern/Aussagen
 - MetaTalkDE.3x5 mit ca. 1000 Wörtern/Aussagen
- Die Vokabulare 6x11, 5x9, 4x7 bieten umfassende grammatikalische Funktionen mit besonders intuitivem Zugang. Zur Erweiterung der Vokabulare enthält die Symbolbibliothek alle METACOM Symbole in Form von fertigen Tasten mit Sprachfunktion, Wortartzuordnung und Wortformen, die nur noch ins Vokabular gezogen werden müssen.



Eigene Vokabulare in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Stimmen

Eigene Vokabulare lassen sich jetzt in unterschiedlichen Sprachen anlegen und mit jeweils passenden Stimmen nutzen. Jedem Vokabular kann eine andere Stimme zugeordnet werden. Damit wird es möglich, Vokabulare mit wichtigen Aussagen für die Kommunikation in anderen Sprachen zu erstellen. Übersetzungen der Symbolbibliothek und die Grammatikfunktionen der deutschsprachigen Vokabulare stehen für andere Sprachen noch nicht zur Verfügung.

Vokabulare miteinander verlinken und gleichzeitig nutzen

Die neue Tastenfunktion „gehe zu Vokabular ...“ ermöglicht einfaches Wechseln zwischen Vokabularen und lässt sich für verschiedene Zwecke nutzen:

- übergangsweise beim Umstieg von einer auf eine andere Rastergröße
- um Vokabulare in unterschiedlichen Sprachen zu nutzen
- um nicht dauerhaft benötigte Seiten als separate Vokabulare einzubinden, z. B. die Lernspiele-Vokabulare aus dem Downloadbereich (www.metacom-symbole.de > Downloads > Vokabular ...)

Was ist sonst noch neu?

- Antippen der Alles-Löschen-Pfeiltaste links in der Sammelleiste stoppt jetzt auch die Sprachausgabe
- Suchergebnisse lassen sich für Begleitmaterial leicht als Symbolpfade speichern, jetzt auch inklusive blauer Uhr bei lange zu drückenden Pronomentasten
- Tasten, die man im Seiteneditor von einer Seite in den Spezial-Tasten-Bereich zieht, werden jetzt kopiert, auf der Seite aber nicht mehr entfernt
- im Seiten-Manager können jetzt beliebig viele Seiten exportiert werden
- weitere Verbesserungen und Korrekturen

App-Versionen

- MetaTalk (inklusive Acapela Erwachsenen-Stimmen, zusätzliche Kinderstimmen als In-App-Kauf)
- MetaTalk SE (Acapela Erwachsenen- und Kinderstimmen bereits integriert, kein In-App-Kauf erforderlich)
- MetaTalk Companion (App ohne Sprachausgabe)

Herausgeber der App MetaTalk:
Cidar Software & Consulting GmbH
von Sandt-Straße 30, 53225 Bonn
Entwicklung in Kooperation mit:
Annette Kitzinger, 24988 Oeversee

Kontakt: support@metatalk.app



App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist.