



MetaTalk

Neue Version 5.0

kostenloses Update für alle MetaTalk Apps

Was ist neu?

METACOM 9 Symbolbibliothek

In der Bibliothek sind ca. 7000 neue Symbolen als gebrauchsfertige Tasten mit Wortartzuordnung und Wortformen hinzugekommen, die bei Bedarf einfach per Drag-and-Drop ins Vokabular eingefügt werden können. Insgesamt enthält die Symbolbibliothek jetzt ca. 17000 METACOM Symbole.

Hautfarben einstellbar

Neu in den Einstellungen ist die Möglichkeit, die Hautfarbe in den Symbolen wahlweise „hell“ oder „gemischt“ einzustellen. Wird „gemischt“ gewählt, werden in den Vokabularen alle Symbole, zu denen es Alternativen mit dunkler bzw. gemischter Hautfarbe gibt, in der dunklen/gemischten Variante angezeigt. Symbole, zu denen es keine Varianten gibt, erscheinen weiterhin mit heller Hautfarbe. Während die Einstellung „hell“ für ein ruhigeres Gesamtbild mit hohen Kontrasten sorgt, wird mit der Einstellung „gemischt“ Diversität abgebildet.



[weiterlesen: Handbuch S. 29](#)

Wochentagssymbole mit anderen Farbschemas

Die in die MetaTalk Vokabulare eingefügten Wochentagssymbole entsprechen einem weit verbreiteten Farbschema. In einigen Regionen werden aber auch andere Farbschemas eingesetzt, zu denen jetzt Symbolalternativen in der Bibliothek zu finden sind. Außerdem gibt es Varianten mit zusätzlichen Merkbildern. Bei Bedarf können die Tasten einfach getauscht werden. Zur Unterscheidung der Zugehörigkeit sind bei den alternativen Varianten an die Tagesnamen Buchstaben angehängt.



[weiterlesen: Handbuch S. 64](#)




Rot-blaue Buchstaben für zweifarbiges Schreiben und Buchstaben mit Anlautbildern

Neben den schwarzen Buchstaben stehen in der Bibliothek jetzt rote und blaue sowie mit Anlautbildern kombinierte Buchstaben zur Verfügung.

Mit Hilfe der blauen und roten Buchstaben lassen sich Buchstabenseiten erstellen, mit denen Silben abwechselnd blau und rot geschrieben werden können. Das zweifarbige Lesen und Schreiben unterstützt vor allem Lese- und Schreibanfänger:innen. Auch die mit Anlautbildern kombinierten Symbole können das Lesen- und Schreibenlernen unterstützen.

Fertige MetaTalk Seiten mit den neuen Buchstabenvarianten und Lautfeedback stehen als Download zur Verfügung: www.metacom-symbole.de/downloads/download_metatalkde.html

Außerdem sind im Downloadbereich passende Anlaut-Begleitmaterialien zum Ausdrucken zu finden: https://metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html

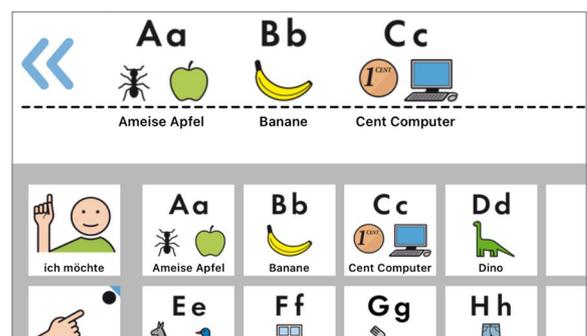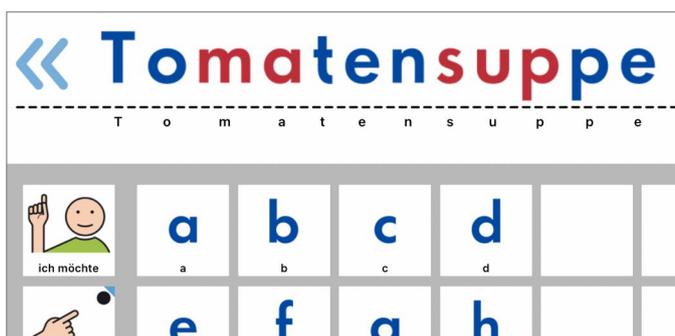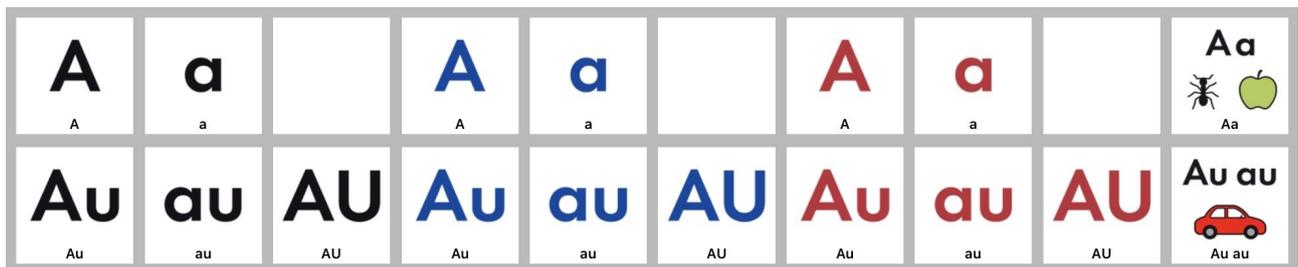

weiterlesen: Handbuch S. 67

Alternative Zahlen-Symbole 4 und 7

Die neuen Varianten für die Ziffern 4 und 7 in der Bibliothek können bei Bedarf auf den Zahlenseiten eingefügt werden.



Bitte beachten ...

Beim Updaten sollten alle Anpassungen in den Vokabulare erhalten bleiben. Dennoch bitte unbedingt **vor dem Updaten** mit Hilfe der Export-Funktion ein **Backup** der angepassten Vokabulare erstellen!

Vokabulare und Seiten aus der alten MetaTalk Version können nach dem Updaten in die neue Version importiert werden. Vokabulare und Seiten aus der neuen Version lassen sich jedoch nicht mehr in die alte Version importieren. **Um mit der neuen MetaTalk Version erstellte Inhalte auf einem anderen iPad nutzen zu können, muss sich auf diesem ebenfalls die neue MetaTalk Version befinden.**